

ZAHNFILM -ENTWICKLER -FIXIERER



Röntgenchemikalien für Handtankanlagen.

▶ ZAHNFILM-ENTWICKLER-KONZENTRAT

entwickelt alle gebräuchlichen Zahnfilme mit niedrigstem Grundschleier und der geforderten steilen Gradation.

Zur Regenerierung des Entwicklerbades wird das gleiche Konzentrat nur in geringerer Verdünnung verwendet.

▶ ZAHNFILM-FIXIER-KONZENTRAT

fixiert alle Zahnfilme rasch und gestattet kurze Wässerungszeiten.

Die Konzentrate erlauben einen bequemen und sicheren Ansatz jeder gewünschten Teilmenge.

Konfektionierung:

DENTAL-Kombinationspackung

1 Liter Entwicklerkonzentrat	für 5 Liter	
1 Liter Fixierkonzentrat	für 5 Liter	Art.-No. 00045

Entwickler-Konzentrate für alle Röntgenzahnfilme

1 Liter Entwicklerkonzentrat	für 5 Liter	Art.-No. 00047
5 Liter Entwicklerkonzentrat	für 25 Liter	Art.-No. 00048

Fixier-Konzentrate für alle Röntgenzahnfilme

1 Liter Fixierkonzentrat	für 5 Liter	Art.-No. 00088
5 Liter Fixierkonzentrat	für 25 Liter	Art.-No. 00089



GEBRAUCHSANWEISUNG:



KONZENTRATE

für Handtankanlagen

ZAHNFILM-ENTWICKLER-KONZENTRATE

Art.-No. € 00047 1 Liter für 5 Liter gebrf. Lösung

Art.-No. € 00048 5 Liter für 25 Liter gebrf. Lösung

ZAHNFILM-RAPID-FIXIER-KONZENTRATE

Art.-No. € 00088 1 Liter für 5 Liter gebrf. Lösung

Art.-No. € 00089 5 Liter für 25 Liter gebrf. Lösung

DENTAL-KOMBINATIONSPACKUNG

Art.-No. € 00045 1 Liter Entwickler-Konzentrat für 5 gebrf. Lösung und
1 Liter Fixier-Konzentrat für 5 gebrf. Lösung

Ansatz der Chemikalien:

▶ ZAHNFILM-ENTWICKLER-KONZENTRAT

1 Teil Konzentrat + 4 Teile Wasser GUT UMRÜHREN!

Entwickler-Temperatur: 18° - 24 °C

Entwicklungszeiten:

bei 18 °C	6 Minuten
bei 20 °C	5 Minuten
bei 22 °C	4 Minuten
bei 24 °C	3 Minuten

Regenerierung: Man stellt eine Lösung von 1 Teil Konzentrat mit 2 Teilen Wasser her und ersetzt damit die durch die Filme verschleppte Entwicklermenge.

▶ ZAHNFILM-FIXIER-KONZENTRAT

1 Teil Konzentrat + 4 Teile Wasser GUT UMRÜHREN!

Fixierbad-Temperatur: nicht unter 18 °C

Regenerierung: mit **unverdünntem** Konzentrat

ALLGEMEINE HINWEISE:

- Eine homogene Vermischung aller Chemikalienbäder ist unbedingt erforderlich.
- Stets das Fixierbad zuerst ansetzen, damit eine Verunreinigung des Entwicklerbades vermieden wird.
- Alle Chemikalienbäder arbeiten bei Temperaturen unter 18 °C stark verlangsamt.
- Die Filme sind vor dem Einbringen in das Fixierbad kurz zu wässern.

Sicherheitsratschläge:

In der Fotografie verwendete Chemikalien und deren Lösungen können beim Kontakt mit der Haut Reizungen hervorrufen. Deshalb sollte bei Hautkontakt die betreffende Stelle sofort mit viel Wasser abgespült werden.

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Reizt die Augen und die Haut. Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Bei Ansatz und Umfüllen der Lösungen, sowie bei der Reinigung des Arbeitsplatzes empfiehlt sich die Verwendung von Gummihandschuhen und Schutzbrille.